

# Informativní výtisk

## OTH - Příloha č. 8 k LP (Odb. materiál)

Pracovní instrukce/číslo: D-PI-OTH-008

verze : 06

strana : 1 z 1

## ODBĚROVÝ MATERIÁL PRO VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI OTH ON JIČÍN A. S.

Vyšetření	Materiál	Zkumavky
- Krevní obraz (WBC, RBC, HCT, HBG, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT) - Diferenciální počet leukocytů - Retikulocyty	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 2 ml S - červený 2,7 ml D - zelený 2,5 ml
- Trombocyty – ThromboExact	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka – ThromboExact S - tmavě růžový 2,7 ml k dispozici na OTH (tel. 286)
- KO z prstu	nesrážlivá krev	1 mikrozkušavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 0,5 ml krve S - červený 0,2 ml krve (pouze OSJC)
- Sedimentace	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka s citrátem V - černý 2,9 ml (citrát 3,2% 1:4)
- Koagulační vyšetření: → PT, APTT, TT, FBG, AT, DD, EGT, LMWH, DTI, DXaI = 1 zkumavka; dodat do 2 hodin, EGT dodat do 30ti min → APC-R = 1× 4,5 ml, nebo 2× 3 ml; dodat do 1 h	nesrážlivá krev	Plastové zkumavky s citrátem 1:9 V - modrý 4,5 ml V - modrý 3 ml V - modrý 2 ml (odběr u dětí) S - zelený 5 ml S - zelený 3 ml
- Punktát	punktát	1 plastová zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 2 ml S - červený 2,7 ml D - zelený 2,5 ml
- Likvor	likvor	1 plastová zkumavka bez přísad, sterilní So - červený 20 ml
- Krevní skupina	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 4 ml S - červený 4,9 ml
- Krevní skupina - Screening nepravid. protil. proti erytrocytům - Test kompatibility - Přímý antiglobulinový test	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 6 ml S - červený 4,9 ml
- Krevní skupina u novorozence - Imunní aglutininy (VIP), PAT	nesrážlivá krev	1 plastová zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA V - fialový 4 ml
- Chladové aglutininy <i>Odběr nahřátou jehlou do nahřáté zkumavky, transport v termoboxu. Ihned centrifugovat a oddělit sérum.</i>	srážlivá krev	1 plastová zkumavka bez separačního gelu V - červený (bez granulí) 6 ml S - bílý 5,5 ml

Vysvětlivky:

V = Vacuette, D = Dispolab, S = Sarstedt, So = Sogeva.

Platnost od: 1. 9. 2018